

Comment utiliser son GoGirl ?

Prise en main :

Uriner debout est une révolution pour les femmes. Par conséquent, ça s'apprend ! Pour une utilisation optimale, nous te recommandons de t'entraîner dans la douche et de tenir ton GoGirl entre le pouce et le majeur (voir images ci-dessous). Il est très important de bien maintenir le GoGirl grâce à ton majeur pour ne faire plus qu'un avec lui. Conçu en silicone médical, ton GoGirl est très flexible. Il peut s'adapter à toutes les morphologies.

Comment le ranger dans son tube en plastique :

Après utilisation, le rincer directement, si possible, au robinet ou grâce à une bouteille ou une gourde. Le ranger dans son sac et son étui et chez toi, le nettoyer à l'eau claire avec du savon. Le sécher. Le plier en deux et le rouler dans le sac d'emballage d'origine ou dans n'importe quel sac plastique propre. Pour plus de commodité, ajouter un mouchoir à l'intérieur du sac. Une fois enroulé, il te suffit de le ranger dans son tube. Et voilà ton GoGirl est prêt pour de nouvelles aventures.



Instructions :

1. Ajuste tes vêtements.
2. Positionne le fermement au niveau de l'entrejambe contre ton corps.
3. C'est l'heure de...GoGirl !!
4. Après utilisation rince le puis range le dans un sac en plastique puis dans son étui pour le réutiliser (lavez-le avec de l'eau et du savon).



La meilleure publicité c'est vous!
Venez partager votre expérience sur notre site internet.
Vous faites confiance à GoGirl et j'en suis ravie. J'espère qu'il vous sera aussi profitable qu'à ces milliers de femmes à travers le monde.